





Cetro

Nabelschnurring

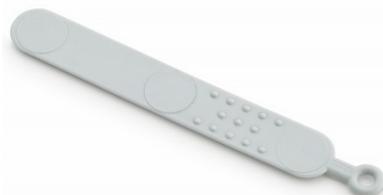

Latexfreies Gummi

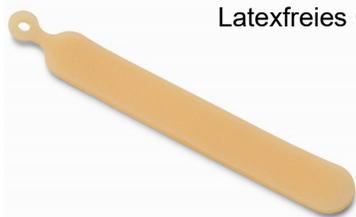


Hochgereinigtes Latex

Mehr Komfort für Mutter und Kind

Vorteile:


- Einfach zu handhaben
- Einzel steril verpackt
- Flexibler, dehnbare Ring
- Einheitsgröße, auch für dicke Nabelschnüre
- Muss nicht entfernt werden
- Angenehmer für Mutter und Kind
- Stört nicht beim Wickeln

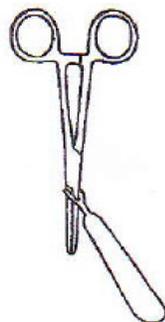


1. Schieben Sie die Arterienklemme durch die Schlaufe des Nabelschnurrings. Klemmen Sie mit einer weiteren Klemme die Nabelschnur nahe der Mutter ab.




2. Klemmen Sie mit der Klemme, die den Nabelschnurring hält, nahe dem Kind ab. Achten Sie darauf, dass die Nabelschnur ganz von der Klemme erfasst wird.

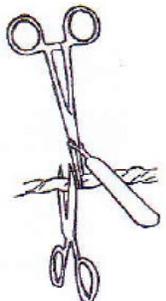


3. Schließen Sie die Klemme mit dem aufgezogenen Nabelschnurring, dann durchtrennen Sie mütterlicherseits die Nabelschnur.

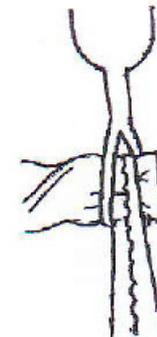

4. Nehmen Sie die Zughilfe des Nabelschnurrings und ziehen diesen von der Klemme über die Nabelschnur.

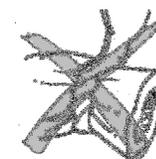

5. **WICHTIG!** Der Ring darf sich nicht verdrehen, da er sonst reißen kann.

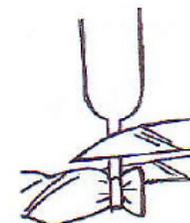

6. Schneiden Sie die Zughilfe des Nabelschnurrings nahe der Nabelschnur ab.



7. Fertig!

Vertrieb durch Gottlob Kurz GmbH
Hinterbergstr. 14 65207 Wiesbaden
Tel. +49(0) 611 189 90 19
Fax. +49(0) 611 950 59 80
www.gottlob-kurz.de
info@gottlob-kurz.de