

KERN® KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
www.kern-sohn.com

Betriebsanleitung Umfangmesser
Manual Instruction Measurement Tape
Mode d'emploi
Dispositif de Mesure du Tour

KERN MSW 200

Version 1.0
2017-10
D, GB, F



MSW-BA-def-1710


Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques

Max. Länge/Length/Longeur (m/inch)	2.05 / 80
Min. Länge/Length/Longeur (cm/inch)	10 / 4
Ablesbarkeit / Readability / Lisibilité (mm/inch)	1 / 0.1
Abmessungen / Dimensions / Dimensions (mm)	55 x 90 x 20
Nettogewicht / Net weight / Poids net (kg)	0.05
Einheit / Unit / Unité	cm / inch
Toleranz / Tolerance / Tolérance (mm)	5
Verwendungstemperatur Use temperature Température d'utilisation	+10 ... +40°C

2

MSW-BA-def-1710

Bedienung / Operation / Fonctionnement

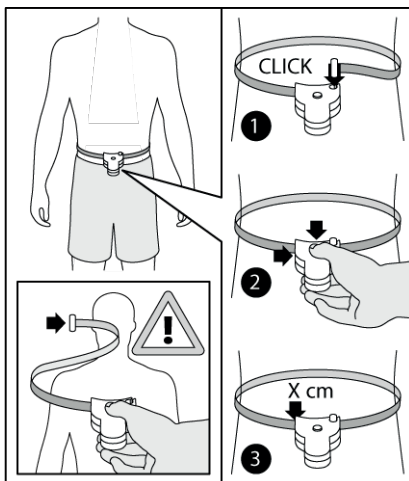

MSW-BA-def-1710

3

WHO Angaben / WHO Information / WHO Information

Geschlecht / Gender / Sexe	✓	⚠
♂	< 102 cm	≥ 102 cm
♀	< 88 cm	≥ 88 cm

Reinigen-Desinfizieren / Cleaning-disinfecting / Nettoyer-désinfecter

Umfangmesser nur mit einem Haushaltsreiniger oder handelsüblichem Desinfektionsmittel, z.B. 70% Isopropanol reinigen. Wir empfehlen ein Desinfektionsmittel, das zur Wischdesinfektion spezifiziert ist. Bitte die Hinweise des Herstellers beachten.

Clean Measurement Tape with household detergents or commercially available disinfectants, e.g. 70% isopropanol. We recommend a disinfectant suitable for wiping disinfection. Please follow manufacturer's instructions.

Nettoyer le Mesure du Tour avec un nettoyeur ménager ou un désinfectant commercial, p.ex. 70% isopropanol. Nous recommandons un désinfectant spécifique pour la désinfection en essuyant. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant.

4

MSW-BA-def-1710