



Zinnhütchen

Cappellinos

Stillkappchen



unterstützen die natürliche Heilung

Eigenschaften:

Die Zinnhütchen sind aus reinem Zinn von Hand gefertigt. Sie dienen dem Schutz der Brustwarzen generell und helfen -bei Überreizung und Entzündung während der Stillzeit - ein Klima zu schaffen, dass die natürlichen Heilungskräfte der Muttermilch aktiviert. Das Zinn reguliert durch seine Eigenschaften als Metall die Situation von „Nass und Trocken“, beugt so Irritationen vor und unterstützt den Heilungsprozess auf sanfte Weise.

Handhabung:

Die Zinnhütchen sind von Hand gefertigt, und in ihrer Grundform fest. Da das Zinn aber sehr weich ist, kann es von Hand mit etwas Entschlossenheit und Kraft in die ideale Passform gebracht werden.

Anpassen:

Sie können die Zinnhütchen in Ihrer Form ohne Korrektur aufsetzen und tragen. Sollten dennoch Druckstellen entstehen kontrollieren Sie, ob Ihre Bekleidung vielleicht zu viel Druck ausübt. Wenn das nicht der Fall ist, merken Sie sich die Position und biegen Sie das Zinnhütchen dort, wo die Kante zu markant oder der Rand zu steil ist, in die richtige Form. Kontrollieren Sie die Passform, und setzen Sie das Zinnhütchen nun in dieser Position auf.

Pflege:

Wir empfehlen, die Zinnhütchen regelmäßig und gründlich zu reinigen. Bitte entfernen Sie etwaige Seifenreste gründlich mit sehr heißem Wasser. Verwenden Sie zur Desinfektion kochendes Wasser. Da Zinn einen tiefen Schmelzpunkt hat, vermeiden Sie bitte den Kontakt mit der Herdplatte.

Anwendung:

Halten Sie sich bitte an die Anweisung Ihrer Hebamme oder Stillberaterin.

Kochen Sie die Zinnhütchen vor dem ersten Gebrauch auf jeden Fall aus!

Die Zinnhütchen werden vorzugsweise mit etwas Muttermilch benetzt oder angefüllt aufgesetzt. So kann sich das Klima zur Heilung entfalten. Bitte entfernen Sie etwaige ältere Muttermilch vor dem Stillen sorgfältig und reinigen Sie die Brustwarzen sanft. Ein immer wieder frisches Klima in den Zinnhütchen begünstigt den Heilungsverlauf.

Aufbewahrung:

Wenn Sie die Zinnhütchen nicht mehr benötigen, verpacken Sie sie luftdicht, und lagern Sie sie an einem lichtgeschützten Ort. Vor dem Wiedergebrauch sollten Sie die Zinnhütchen zur Desinfektion auskochen.



Metallatelier Hilden GmbH
CH-4144 Arlesheim, Brüggweg 49a

Vertrieb durch Gottlob Kurz GmbH

Hinterbergstr. 14 65207 Wiesbaden

Tel. +49(0) 611 189 90 19

Fax. +49(0) 611 950 59 80

www.gottlob-kurz.de

info@gottlob-kurz.de